

Navina Classic – Produktinformationen

Produktbeschreibung

Transanales Irrigationssystem mit manueller Kontrolleinheit.

Haltbarkeit und Anwendungen

Alle Komponenten des Navina Irrigationssystems haben eine Haltbarkeit von 3,5 Jahren, mit Ausnahme der Navina Katheter und des Navina Konus, bei denen die Haltbarkeitsdauer 2 Jahre beträgt. Wenn Navina Komponenten in Sets verpackt sind, bestimmt die Komponente mit der kürzesten Haltbarkeitsdauer die Haltbarkeitsdauer des Sets.

Navina Katheter und Konusse sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt, der Wasserbehälter kann 15 Mal verwendet werden und die Navina Classic-Kontrolleinheit und das Schlauchset können 100 Mal verwendet werden.

Materialzusammensetzung

Kathetermaterial: Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol (SEBS)/Polypropylen (PP) mit einer hydrophilen Beschichtung aus Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Primärpackmittel: PE/PET-Beutel.

Sekundärpackmittel: Karton und Wellpappe.

Verwendungszweck

Das Navina System ist für die transanale Irrigation vorgesehen, indem Wasser durch einen Rektalkatheter in den unteren Teil des Dickdarms instilliert wird.

Indikationen

Das Navina System ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren indiziert, die an Stuhlinkontinenz, chronischer Verstopfung und/oder unter einem zeitaufwendigen Darmmanagement leiden. Durch Einleiten von Wasser in den unteren Bereich des Darms können die peristaltischen Muskeln im Darm stimuliert werden und beginnen, den Inhalt von Dickdarm und Rektum zu entleeren.

Kontraindikationen

Wenden Sie Navina Systems in den folgenden Fällen NICHT an:

- Bekannte Anal- oder Kolorektalstenose.
- Aktive entzündliche Darmerkrankung.
- Akute Divertikulitis.
- Kolorektaler Krebs.
- Ischämische Kolitis.
- Innerhalb von drei Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation.
- Innerhalb von 4 Wochen nach einer endoskopischen Polypektomie.

Da die Liste der Kontraindikationen möglicherweise nicht vollständig ist, berücksichtigt das Pflegepersonal/med. Fachpersonal auch stets individuelle Faktoren.



Navina Classic System

Artikelnummer	Typ	Angaben
6900515	Navina Classic System Regular	1 Navina Classic-Kontrolleinheit
6900715	Navina Classic System Small	1 Wasserbehälter
6901715	Navina Classic System – Konus	1 Schlauchset
		2 Rektalkatheter
		1 Navina
		Tragetasche
		1 Zubehörset
6900615	Navina Classic System Regular Refill	1 Navina Classic-Kontrolleinheit
6900815	Navina Classic System Small Refill	1 Wasserbehälter
6901815	Navina Classic System Cone Refill	1 Schlauchset
		2 Rektalkatheter
6900300	Navina Verbrauchsmaterialien-Set – Regular	
6900400	Navina Verbrauchsmaterial-Set in Größe „Small“	1 Wasserbehälter
6901600	Navina Verbrauchsmaterial-Set Konus	15 Rektalkatheter
6894000	Navina Katheter-Set der Größe „Regular“	
6894300	Navina Katheter-Set in Größe „Small“	10 Rektalkatheter
6901100	Navina Schlauchset	1 Katheterschlauch
		1 Wasserbehälter-schlauch
		2 Halteringe (1 vertikal, 1 horizontal)
		1 Trageband
6901200	Navina-Zubehör	1 Positionierungsgurt
		1 Navina Smart-Positionierungsklammer
6901360	Navina Classic-Kontrolleinheit	1 Navina Classic-Kontrolleinheit

Navina™ Classic



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.at



Rx Only