

Navina Mini – Produktinformationen

Produktbeschreibung

Produkt für die transanale Irrigation mit geringem Volumen (185ml).

Haltbarkeit und Anwendungen

Alle Navina Mini-Komponenten haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren.
Der Konus ist ein Produkt für den Einmalgebrauch und darf nur einmal verwendet werden. Der Wasserbehälter und der optionale Verlängerungsschlauch können 60 Mal verwendet werden.

Materialzusammensetzung

Hauptkomponenten des Produkts: Wasserbehälter, Rektalkonus und Verlängerungsschlauch bestehen aus thermoplastischem Elastomer (TPE).

Hydrophile Oberflächenbeschichtung des Konus: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Primärpackmittel: Polyethylen (PE)

Sekundärpackmittel: Karton und Wellpappe.

Navina Mini ist latex-, PVC- und phthalatfrei.

Verwendungszweck

Navina Mini ist für die transanale Irrigation vorgesehen, indem eine geringe Wassermenge über einen Rektalkonus für den Einmalgebrauch in das Rektum instilliert wird.

Indikationen

Navina Mini ist für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 3 Jahren indiziert, die an unvollständiger Stuhlentleerung und/oder Stuhlinkontinenz leiden.

Kontraindikationen

Wenden Sie Navina Mini NICHT in den folgenden Fällen an:

- Bekannte Analstenose.
- Aktive entzündliche Darmerkrankung.
- Akute Divertikulitis und divertikulärer Abszess.
- Kolorektaler Krebs.
- Ischämische Kolitis.
- Innerhalb von drei Monaten nach einer analen oder kolorektalen Operation.

Da listen måske ikke er udtømmende, skal sundhedspersonalet også altid tage individuelle brugerfaktorer i betragtning.



Navina Mini

Artikelnummer	Typ	Angaben
6931000	Navina Mini Starter Set	1 Wasserbehälter, 5 Rektalkonusse, 1 Verlängerungsschlauch
6930700	Navina Mini Set	1 Wasserbehälter, 30 Rektalkonusse
6930800	Navina Mini Extension Set	1 Wasserbehälter, 30 Rektalkonusse, 1 Verlängerungsschlauch
6930900	Navina Mini Refill Set	30 Rektalkonusse

Navina™ Mini



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.at



Rx Only